

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストینگワックス (コード: 16189000)

サンエスディスクW

【形状・構造等及び原理等】

* 【形状・種類】

種類	サイズ	色調
ヒート	φ98×T20mm	グレー
	φ98×T14mm	

〔成分〕

低分子量ポリエチレン系樹脂、パラフィンワックス
着色染料

〔原理〕

歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニットにて
切削加工を行い、歯科鑄造物のロウ型に用いる。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキ
ャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

〔本材に使用する機械〕

歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット

〔使用方法〕

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じ、マージ
ンの調整を行い、通法に従い、スプルーを植立し、埋没、鑄造を
行う。

** 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本材は常温 (15～25℃) で使用すること
加工前に、本材の温度が常温であることを確認すること。
- 2) 再溶解して使用しないこと。
- 3) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
- 4) 石こう系埋没材を使用する場合、マージンにバリがでることが
ある。その場合、急速加熱を避けるか、マージンをワックスで
調整すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の切削粉が目に入らない様に注意すること。万一目に入った
ときは、直ぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断をうけること。
- 2) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意
すること。
- 3) 本材を焼却する際は局所排気装置や換気扇などを設け、焼却に
よる煙及び蒸気を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

** 【保管方法】

- 1) 本材は、高温・多湿の場所を避けて 40℃以下で保管すること。
- 2) 本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 3) 本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に
保管しないこと。
- 4) 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理
すること。

〔有効期間〕

本材の使用期限※は、包装に記載のとおり。

※ (例) 20YY-MM は
使用期限 20YY年MM月 を示す)
〔記載の使用期限は自己認証 (当社データ) による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サンエス石膏株式会社

HP: <http://www.san-esugypsum.co.jp>

問い合わせ番号: 0120-351440