

機械器具（09） 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 汎用 X 線診断装置用非電動式患者台 JMDN 40654000

特定保守管理医療機器（設置） DR 対応リーダー撮影台 LDR-Pro（K）

【警告】

1. X 線防護について
 - ・ X 線装置を誤って使用すると、身体に危害を及ぼす場合があります。
2. 被検者に関する警告
 - ・ 被検者が支柱部のレールに触れない様ご指導願います。ケガや、衣服を汚す恐れがあります。
 - ・ 被検者が撮影位置に立つ時基台につまずかない様ご指導願います。
 - ・ 被検者が受像部の稼動部分に触れない様ご指導願います。受像部を上下移動させた場合、身体の一部が挟まりケガをする恐れがあります。
3. 使用上の警告
 - ・ 操作者は常に被ばくを防ぐ様に注意して下さい。特に撮影中に撮影室に入室する必要がある時は、防護衣、防護装置等を使用し不必要な被ばくのない様に充分注意して下さい。
 - ・ カセット枠部に 43 N 以上の荷重をかけて使用しないこと。

【禁忌・禁止】


- ・ 妊婦・産婦への X 線照射は避けて下さい。
- ・ 小児への過剰な X 線照射は避けて下さい。
- ・ この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
- ・ 患者自身の状態によって、患者本人を危険な状態にすると判断される場合は使用しないこと。

据え置き型（LDR-Pro）

【形状・構造及び原理等】

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 支柱部
- (2) カセット枠部
- (3) 上ベース
- (4) スプリングユニット
- (5) 床ベース
- (6) 握り棒
- (7) ロックレバー
- (8) 取っ手
- (9) ワイヤー

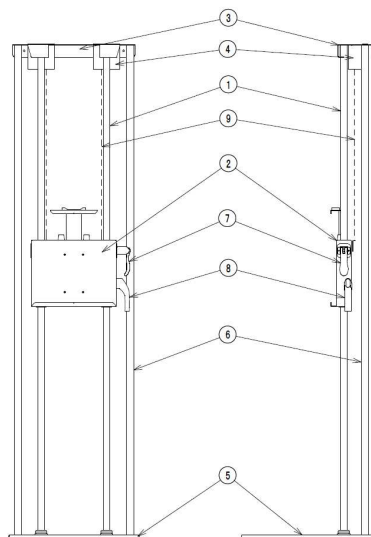

【使用目的又は効果】

1. 仕様
 - 支柱部 25.0mmφ長さ1.910mm
 - カセット枠移動 床ベース上からカセット下迄 20～1.524mm
 - コンストンスプリング方式
 - 機械式ロック方式
 - カセット枠部 撮影サイズ 6切縦から半切縦横
2. 使用目的
 - この装置は X 線管球と組合せてカセット枠部にカセット、グリッドをセットして立位撮影に用いる立位撮影台です。
3. 本体寸法及び重量
 - 寸法 (mm) : 500 (W) × 505 (D) × 1.910 (H)
 - 重量 : 約 21.0 kg

詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用方法等】

- 使用環境条件
- 温度 10～40℃
 - 湿度 30～85%RH（結露なきこと）
- 設置上の注意
- 装置の設置は傾きの無いように設置して付属のネジで固定してください。
- 操作方法
1. 撮影準備
 - ①カセット、グリッドを装着する場合、カセット枠の中心に確実にセットすること。
 - ②カセット枠の上下の位置合わせは、カセット枠上下動ロックレバーを緩めて、カセット枠を上下に移動する。移動後は、確実にロックレバーを締付けてカセット枠を固定すること。
 2. 撮影操作
 - ①本装置と接続されている X 線装置を操作して撮影を行うこと（X 線装置の取扱説明書に従って操作すること）。
 - ②撮影後、カセット、グリッドをカセット枠から取外すこと。
 3. 撮影終了
 - ① X 線装置の電源を切り、本装置の清掃を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品が確実に固定されていることを確認すること。
- ②カセット枠部を上下移動させるときは、患者の手足指等が挟まれないよう注意すること。又位置決定後は左右のロックレバーを締付けて必ず確実に固定すること。
- ③カセット、グリッドの装着は必ず両手で行うこと。
- ④X 線可動絞りは必要最小の照射野で使用する。
- ⑤検査中は、患者の様子や動作を常に注意すること。
- ⑥CR の場合はカセットとグリッドの向きで干渉ムラが出る場合があります。

その他の注意事項


この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

壁床固定型 (LDR-Pro-K)

【形状・構造及び原理等】

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 支柱部
- (2) カセット枠部
- (3) 上ベース
- (4) スプリングユニット
- (5) 床ベース
- (6) 握り棒
- (7) ロックレバー
- (8) 取っ手
- (9) ワイヤー

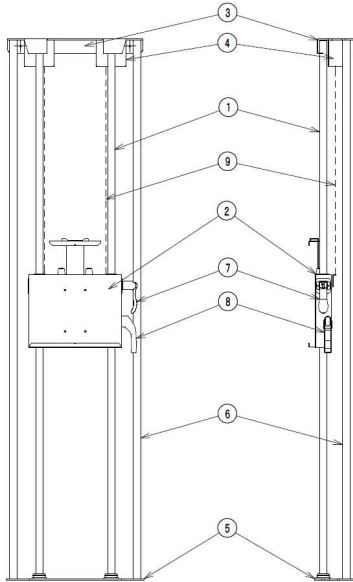

【保守・点検に係る事項】

1. 医用機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による日常および定期点検、指定された業者による定期保守点検を必ず行ってください。
3. 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容 (概要)
70° 受け樹脂の状態	日常	ひび割れ確認
上下ロック動作	日常	固定動作の確認
上部カセット受け動作	日常	全開動作の確認

4. 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
上下ロック動作	1 年又は 3000 回	ロックレバー部注油
ワイヤーの点検	1 年	ヒゲやネジレの確認
各部重要固定部	1 年	固定ねじの増し締め

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者： 株式会社 三協
電 話： 06-6309-5261

〔販売業者 (販売店)〕

【使用目的又は効果】

1. 仕様

支柱部	25.0mmφ 長さ1.890mm
カセット枠移動	床上からカセット枠下面迄 25~1.529mm
	コンストンスプリング方式
	機械式ロック方式
カセット枠部	撮影サイズ 6切縦から半切縦横
2. 使用目的

この装置はX線管球と組合せてカセット枠部にカセット、グリップをセットして立位撮影に用いる立位撮影台です。
3. 本体寸法及び重量

寸法 (mm) :	470 (W) × 164 (D) × 1.890 (H)
重量 :	約13.0kg

詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用方法等】

- 使用環境条件 ●設置上の注意 ●操作方法
頁1の据え置き型と同じ。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意 ●その他の注意事項
頁1の据え置き型と同じ。

【作動・動作原理】

本装置はコンストンスプリングにてカセットバランス備え、いずれもカセット枠の上下移動を容易に手動で行うことができる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用耐用年数 (自主基準)
指定された保守点検を実施した場合に10年間
2. 定期交換部品
カセット枠部上下ロックレバー
コンストンスプリング

取扱説明書を必ずご参照下さい。