

機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (JMDN:70757000)
MIS補綴プランニングキット

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

・当社が指定する製品以外には使用しないこと。([相互作用]の項参照)

＜使用方法＞


・スタンダードプラットフォーム(SP)及びワイドプラットフォーム(WP)の混同に注意すること。

・本品は口腔内でアバットメントとして使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【構成品】

各構成品の製品名、サイズ等については内包するマニュアルの記載を確認すること。

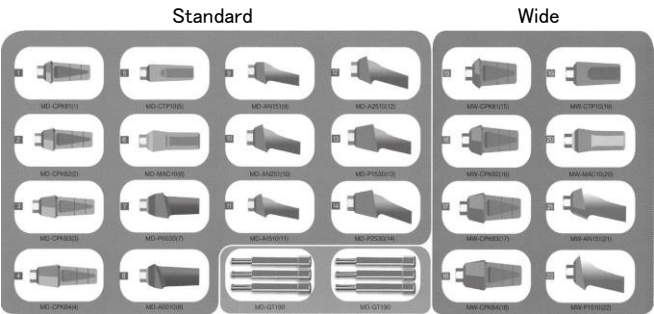

【構成品】

品番	品名	着色
① MD-CPK81-1	アナトミックアバットメント SP H=1mm,C=8mm	紫色
② MD-CPK82-2	アナトミックアバットメント SP H=2mm,C=8mm	
③ MD-CPK83-3	アナトミックアバットメント SP H=3mm,C=8mm	
④ MD-CPK84-4	アナトミックアバットメント SP H=4mm,C=8mm	
⑤ MD-CTP10-5	セメンティングポスト ナロー SP	
⑥ MD-MAC10-6	セメンティングポスト SP	
⑦ MD-P0030-7	エステティックアバットメント SP 3mm	
⑧ MD-A0010-8	エステティックアバットメント SP 1mm	
⑨ MD-AN151-9	アングルアバットメント SP 15°	
⑩ MD-AN251-10	アングルアバットメント SP 25°	
⑪ MD-A1510-11	エステティックアングルアバットメント SP 15° 1mm	
⑫ MD-A2510-12	エステティックアングルアバットメント SP 25° 1mm	
⑬ MD-P1530-13	エステティックアングルアバットメント SP 15° 3mm	
⑭ MD-P2530-14	エステティックアングルアバットメント SP 25° 3mm	
⑮ MW-CPK81-15	アナトミックアバットメント WP H=1mm,C=8mm	緑色
⑯ MW-CPK82-16	アナトミックアバットメント WP H=2mm,C=8mm	
⑰ MW-CPK83-17	アナトミックアバットメント WP H=3mm,C=8mm	
⑱ MW-CPK84-18	アナトミックアバットメント WP H=4mm,C=8mm	
⑲ MW-CTP10-19	セメンティングポストナロー WP	
⑳ MW-MAC10-20	セメンティングポスト WP	
㉑ MW-AN151-21	アングルアバットメント WP 15°	
㉒ MW-P1510-22	エステティックアングルアバットメント WP 15° 1mm	
㉓ MD-GT190	技工用ガイドピン	—

※①～㉒: 補綴プランニングアバットメントは識別のため、陽極酸化処理(着色)を施している。

【原材料】

チタン合金(Ti-6Al-4V)

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる器具で、歯科技工所において作業模型内のアナログに装着し、アバットメントを選択するために使用する。

【使用方法等】

- (1) 通法に従い印象採得を行い、作業模型を作製する。
- (2) 補綴プランニングアバットメントを、作業模型内のインプラントアナログに補綴用ガイドピンを使用して装着し、上部構造に使用するアバットメントの種類・サイズを選択する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

・本品は MIS インプラント SEVEN 以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ・本品の使用前に、組合わせて使用する製品と適切な嵌合状態を保つことの確認を行うこと。
 - ・使用前・使用後に損傷、キズ等の異常がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) [相互作用] (他の医療機器との併用に関すること)

【併用禁忌・禁止】 (併用しないこと)

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
デンツプライシロナ株式会社
製造業者
MIS Implants Technologies Ltd.(イスラエル)

***[問い合わせ窓口]**

カスタマーサービス
電話番号 0120-667-467