

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう (70897020)

セレックスストーン BC

【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末
成分: 硫酸カルシウム半水塩、着色剤、その他
色調: アイボリー
原理: 本品は、水と練和することにより水和硬化する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工物を作製するために用いる硬質石こう（超硬質石こう）である。

【使用方法等】

- 標準混水量は、粉末 100g に対して水 20ml です。
- 練和時間は、約 30 秒間で均一になるまで練和します。
- 印象に練和した石こうを注入します。注入の際、歯科用バイブレーターで振動を与えると、気泡を取り除くことが可能です。
- 注入後、約 60 分経過すれば模型を取り出せます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品を使用する、また硬化材を研削する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないように注意すること。
- 本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
- 他の製品と混用しないこと。
- 本品を火気の近くで使用しないこと。また火気に投入したりしないこと。
- 本品は使い切ってから廃棄すること。
- 本品の使用により、患者が発疹などの過敏症を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品に対する過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。本品の使用により、術者が過敏症を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品は、目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管の条件
 - 直射日光の当たらない場所に保管すること。
 - 高温多湿の場所を避けて保管すること。
 - 火気厳禁の場所に保管すること。
 - 水のかからない場所に保管すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

- 化学薬品の保管場所やガスの発生しない場所に保管すること。
- 歯科医療従事者以外の者が触れないように保管、管理すること。
- 開封後は、密封して保管すること。

2. 有効期間

本品は、包装に記載してある使用期限までに使用すること。（使用期限はドイツ製造元の自己認証データによる。）
使用期限が過ぎたものは使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
デンツプライシロナ株式会社
電話番号：03-6264-2781

製造業者：
シロナデンタルシステムズ株式会社
Sirona Dental Systems GmbH
（ドイツ連邦共和国）