

\*\*2022年9月（第4版）  
\*2020年2月（第3版）

届出番号：13B1X10236S10013

歯科材料 03 義歯床材料  
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン（70832000）

## セレック ガイド ブロック

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用インプラント手術の際に使用するサージカルガイドを作成するための材料で下記の種類がある。

- ・ CEREC Guide Blocs medi
- ・ CEREC Guide Blocs maxi

主原材料：PMMA

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラント手術の際に使用するサージカルガイドを作成するために使用する。

### 【使用方法等】

1. 患者口腔内又は模型を光学印象採得したデータをエクスポートし、歯科用CT診断装置にて撮影したデータと統合する。インプラントプランニング後のデータを歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットへ取り込む。
2. 歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットでサージカルガイドを設計し、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットのヘッドに本品をセットし、サージカルガイドの切削を行う。
3. 切削が完了したら、サージカルガイド部分を取り外す。
4. 取り外したサージカルガイドをインプラント手術時に使用する。



### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
(1) 切削するサージカルガイドの最小厚みは咬合面及び側面において3mm以上確保すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：  
デンツプライシロナ株式会社  
電話番号：03-6264-2781  
取扱説明書が必要な場合は、こちらにお問い合わせ下さい。

製造業者：  
シロナデンタルシステムズ株式会社  
Sirona Dental Systems GmbH  
(ドイツ連邦共和国)