

ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

**形状：以下種類がある。

1. ミキシングチップ

	種類	カラー	*用途
*	ミキシングチップ ブルー	ブルー	トレー用
*	ミキシングチップ レッド	レッド	ウォッシュ用

2. DECAミキシングチップ

	種類	カラー	用途
*	ダイナミックミキシングチップ	ブルー	DECA用

材質：プラスチック

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料など）を混和する器具である。

【使用方法等】

1. 印象材料等のカートリッジのキャップを取り外し、本品を装着する。
2. ディスペンサーのプランジャーを押すと混和された印象材等が本品より押し出される。また、必要に応じて本品先端に口腔内注入用チップ（別売）を装着し、口腔内での注入にも用いる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は1回の混和操作ごとに使用し、再使用しないこと。
2. 本品に破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 デンツプライシロナ株式会社

*製造国 アメリカ合衆国

*製造業者 デンツプライ社

Dentsply LLC

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123