


機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 70680000

コンピューールガン

【形状・構造及び原理等】

形状: 以下のとおり。

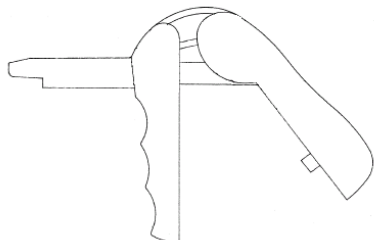

材質: ポリアミド樹脂

【使用目的又は効果】

歯科充填用コンポジットレジン等の歯科材料を歯牙に充填するために用いる再使用可能な手用器具である。

【使用方法等】

歯科充填用コンポジットレジン等のコンピューールを本品先端部に装着し、本品ハンドル部を握り込んでコンピューールからコンポジットレジン等の内容物を押し出して歯牙への充填を行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 本品にコンピューールが確実に装着されていることを確認し、充填時には本品に必要以上の力を加えないこと。
2. 使用後は、装着したコンピューールを外して高圧蒸気滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品に破損・変形等の異常があった場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 デンツプライ コーク社
DENTSPLY Caulk

[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス

* 電話番号 0120-667-467