

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

PoGo (ポリッシュ&ゴー)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品及び本品に含まれる成分に対し発疹や炎症等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

種類: 以下3種類

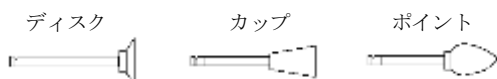

材質: 以下のとおり。

構成品名称	材質
ディスク	ダイヤモンド粉末、UDMA、二酸化ケイ素、 γ -メタクリロキシプロピルトリメチルシラン、BPO、ジヒドロキシ- <i>p</i> -トルイジン、ステンレス鋼
カップ	ダイヤモンド粉末、UDMA、二酸化ケイ素、 γ -メタクリロキシプロピルトリメチルシラン、BPO、ジヒドロキシ- <i>p</i> -トルイジン、BHT、ステンレス鋼
ポイント	ダイヤモンド粉末、UDMA、二酸化ケイ素、 γ -メタクリロキシプロピルトリメチルシラン、BPO、ジヒドロキシ- <i>p</i> -トルイジン、BHT、ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分からなる歯科用研磨材である。

【使用方法等】

1. 通法に従い、レジン充填又はベニア修復を行う。
2. カーバイドバー又はダイヤモンドバー等を用いて余剰物をおおまかに除去し、修復物の形態を修正する。
3. 低速のハンドピース等に中研磨用の研削器材(エンハンスフィニッシング等)を装着し、修復物表面の中研磨を行う。
4. 本品を低速のハンドピース等に装着し、最初に中等度の速度(4,000rpm)で断続的に軽く圧をかけるようにして修復物の研磨を行う。通常の研磨は10,000rpm~15,000rpmで行う。最適な研磨効率を得るため、部位に応じてディスク、カップ、ポイントを使い分ける。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本品は高速のハンドピース等に装着して使用しないこと。
2. 本品は研磨面への注水なしで使用するように設計されているため、断続的に軽く圧をかけるようにして研磨を行い、オーバーヒートに十分注意すること。
3. 側方へ過大な荷重は、マンドレルからのディスクの脱落や損傷、劣化等を起こすことがあるので、十分注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意(次の患者には慎重に適用すること)
本品又は本品に含まれる成分に対し、発疹や炎症等の過敏症の既往歴のある患者には慎重に適用すること。
また、使用により過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 回転時には、口腔内軟組織等に接触して損傷を与えないよう十分注意すること。万が一軟組織等を負傷した場合には、大量の水で患部を洗って医師の診断を受けること。
 - (2) 研磨時に発生する残渣や微粒子等を吸入しないよう、適切な排気(換気)を行って使用すること。
 - (3) 本品は再使用しないこと。
 - (4) 破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- *1. 本品は、10~27℃の乾燥した場所に直射日光を避けて保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本品は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
(記載の有効期間は製造業者データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
*製造業者 デンツプライ社
Dentsply LLC

【問い合わせ窓口】
カスタマーサービス

** 電話番号 0120-667-467