

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

キャビトロン プロフィジェットクリーニングパウダー

【禁忌・禁止】

本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 デンツプライ プロフェッショナル社
DENTSPLY Professional

【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末

成分: 炭酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム、香料

[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467

【使用目的又は効果】

粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

本材歯面清掃器(キャビトロンシリーズ)に使用する歯面清掃用の専用粉末です。使用前によく振ってください。本材のご使用に際しては、歯面清掃器(キャビトロンシリーズ、プロフィジェットシリーズ)の使用説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けさせること。

2. 重要な基本的注意

- 長時間の使用は避けること。
- 他の添加剤は加えないこと。
- 本材を使用する際には、眼の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本材は、高温多湿な場所を避けて保管すること。

本材は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、容器に記載の有効期間までに使用すること。

「記載の使有効期間は製造業者データによる。」