

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用カーバイトバー 16668000  
**メルファーコンポジットCFバー**

**【形状・構造及び原理等】**

種類: FGタイプ 7種類

作業部形状	サイズφISO	全長mm	作業部長さmm	blades
Cone	008	22	3	8
	010	19	4.2	8
	014	21	6	8
	014	23	9	8
Cylindrical round	012	22	8	12
Conical pointed	012	23	3	8
Cone round	014	22	8	12

材質: タングステンカーバイト(炭化硬質合金)

**【使用目的又は効果】**

タングステンカーバイト製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いる。

**【使用方法等】**

1. 歯科用ハンドピースに装着し、回転させて研削、研磨します。  
ソフトタッチ(フェザータッチ)で断続的に被研削物に押し付けてください。
2. 使用回転数は、次のとおりです。  
ISOサイズ 008, 010 30万回転以下  
ISOサイズ 012, 014 15万~20万回転
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。  
(1)付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。  
(2)洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。  
(3)消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。  
(4)発錆する場合がありますので、防錆効果のある洗浄液などをご使用ください。  
(5)オートクレーブなどで滅菌してください。

**【使用方法等に関連する使用上の注意】**

1. 使用中の回転数の変更は、バーが折れることがあるので、行わないこと。
2. 使用回転数を、厳守すること。
3. ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
4. 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
5. 歯髄為害防止のため、注水下でソフトタッチ(フェザータッチ)で使用すること。

**【使用上の注意】**

(重要な基本的注意)

- (1)本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- (2)本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
- (3)損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)などのあるものは使用しないこと。
- (4)折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

- (5)目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- (6)本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
- (7)本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- (8)洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
- (9)強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。  
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

- 本品は、清潔な場所に保管すること。  
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社  
製造国 スイス  
製造業者 メルファー インストゥルメント社  
Maillefer Instruments Holding Sàrl

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス

\* 電話番号 0120-667-467