

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用カーバイトバー 16668000  
**メルファーコンポジットCFバー**

【形状・構造及び原理等】

種類：FGタイプ 7種類

| 作業部<br>形状            | サイズ<br>φISO | 全長<br>mm | 作業部長さ<br>mm | blades |
|----------------------|-------------|----------|-------------|--------|
| Cone                 | 008         | 22       | 3           | 8      |
|                      | 010         | 19       | 4.2         | 8      |
|                      | 014         | 21       | 6           | 8      |
|                      | 014         | 23       | 9           | 8      |
| Cylindrical<br>round | 012         | 22       | 8           | 12     |
| Conical<br>pointed   | 012         | 23       | 3           | 8      |
| Cone<br>round        | 014         | 22       | 8           | 12     |

材質：タングステンカーバイド（炭化硬質合金）

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いる。

【使用方法等】

1. 歯科用ハンドピースに装着し、回転させて研削、研磨します。  
ソフトタッチ（フェザータッチ）で断続的に被研削物に押し付けてください。
2. 使用回転数は、次のとおりです。

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ISO サイズ 008, 010 | 30 万回転以下    |
| ISO サイズ 012, 014 | 15 万～20 万回転 |
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
  - (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
  - (2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
  - (3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
  - (4) 発錆する場合がありますので、防錆効果のある洗浄液などをご使用ください。
  - (5) オートクレーブなどで滅菌してください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 使用中の回転数の変更は、バーが折れることがあるので、行わないこと。
2. 使用回転数を、厳守すること。
3. ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
4. 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
5. 歯髄為害防止のため、注水下でソフトタッチ（フェザータッチ）で使用する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- (1) 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- (2) 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
- (3) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは使用しないこと。
- (4) 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

- (5) 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- (6) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
- (7) 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- (8) 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
- (9) 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。  
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。
- \*\* (10) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状や感作又はアレルギー反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 本品は、清潔な場所に保管すること。  
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 製造販売業者 | デンツプライシロナ株式会社                                         |
| 製造国    | スイス                                                   |
| 製造業者   | メルファー インストルメント社<br>Maillefer Instruments Holding Sàrl |

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス

\* 電話番号 0120-667-467