

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ザーケート プロフィーペースト

【禁忌・禁止】

本品又は本品に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 デンツプライ コーク社
DENTSPLY Caulk

【形状・構造及び原理等】

形状: ペースト
成分: ケイ酸ジルコニウム、脱イオン水、酸化スズ、ソルビトール、グリセリン、香料、他

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467

【使用目的又は効果】

本品は、ペースト状の半固形状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

【使用方法等】

1. 本品をダッペングラス等に適量出す。
2. 本品を研磨カップに適量塗付し、歯面を約 10 秒間、低速回転で研磨する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 研磨カップ等の使用方法に従い、過度の加圧を避けて研磨を行うこと。また歯面の過熱を避けるため、十分な量のペーストを用いて研磨を行うこと。
2. 術者は保護眼鏡やグローブ等を使用すること。
3. 本品の誤飲等を防ぐため、口腔内の唾液を適切に排出しながら歯面研磨を行うこと。
4. 本品を除去する際、本品が歯間部に入り込んでしまった場合は、デンタルフロス等を用いて取り除くこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)
本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のないことを確認すること。本品の使用により過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1)本品を過剰に摂取した場合、嘔吐等の症状が引き起こされることがあるので、本品は飲み込まないこと。
 - (2)本品が眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - (3)本品が皮膚に付着した場合は、石鹸でよく洗浄すること。また、本品の慢性接触により発疹、皮膚炎などの過敏症があらわれた場合は、使用を中止して医師の診断を受けること。
 - (4)他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、高温多湿及び直射日光を避け、25℃以下で保管すること。
2. 本品は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本品は包装ラベルに記載の有効期間までに使用すること。

[記載の有効期間は製造業者データによる。]

(例) EXP: ****-△△は、西暦****年△△月までの有効期間を示す。