

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000  
**カートリッジディスペンサーN**

**【形状・構造及び原理等】**

材質: プラスチック

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科材料(印象材料など)を練和又は混和する器具である。

**\*【使用方法等】**

1. 本品背面の黒いリリース・レバーを上げて、黒いプランジヤーを引けるところまで完全に引いてください。
2. 本品上部のカートリッジ・ロックを上げて、カートリッジのロックを解除してください。
3. V字の切り込みを下にして、アクアジル ウルトラ(別売)のカートリッジを本品に差し込んでください。
4. 本品上部のカートリッジ・ロックを下げて、カートリッジをロックしてください。
5. カートリッジ・キャップを反時計周りに90度回転させて外してください。
6. ミキシングチップ(別売)を装着する前に、ベース及びキャタリストを弱めの圧力で少量出して、カートリッジから均等に出るか確認してください。硬化物がある正常に出ない場合は、インストルメントを使用して硬化物を取り除いてください。確認後、ベース及びキャタリストの余剰分を拭きとってください。
7. ミキシングチップのアライメントピンが、カートリッジの差込口に入るように、ミキシングチップをカートリッジに挿入してください。
8. ミキシングチップがカートリッジに取り付けられたら、時計回りに90度回転させて、ミキシングチップをロックしてください。
9. 本品を使用する際には、適切かつ均一な力でトリガーを握って材料を出してください。トリガーに力を加えるのをやめると、材料は出なくなります。
10. 材料によって、直接口腔内に注入する場合、ミキシングチップから直接口腔内へ材料を注入することができます。その際、口腔内注入用チップ(別売)をミキシングチップの先に取り付けると便利です。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- \*1. カートリッジ保管時には、カートリッジ キャップを再度カートリッジに装着すること。あるいは、使用済のミキシングチップをそのまま次回の使用時まで装着して、キャップとして使用すること。
2. カートリッジを交換する場合は、カートリッジ背面のリリース・レバーを上げて、プランジヤーを引けるところまで完全に引き、空のカートリッジを破棄すること。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

1. 開封直後及び汚染の際(体液の飛散及び付着、あるいは汚染された手や口腔内組織への接触などの場合)は、熱湯と石鹼あるいは合成洗剤を使用して、擦りながら洗うこと。
2. 病院レベルの消毒とされる核菌殺菌性の消毒薬で消毒すること。フェノールやヨード系の消毒薬は表面にステインが生じる可能性があるにご注意すること。アルコールなど有機溶媒を含む液体を使用すると、プラスチック部分を溶解する可能性があるため、水性の消毒薬を使用すること。消毒薬の取扱説明書に従って消毒すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管の条件]

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 デンソプライシロナ株式会社

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

\*\*/\*電話番号 0120-667-467