

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

セルコン ブレイン

【禁忌・禁止】

本機器には高圧電流が流れているので、分解しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔構成品〕

- セルコン ブレイン 本体
- ファインミリングカッター
- ラフミリングカッター
- ミリング用フレーム（12、30、38、47）
- ワックスモデル用フレーム（12、30、38、47）
- ミリングツール用スクリュー（スモール、ビッグ）
- ポジショニングエイド（12、30、38、47）
- ホルダー用スクリュードライバー
- ミリングカッター用スクリュードライバー
- スキャニングパウダー
- ブラシ

〔寸法〕

本体寸法：520(H)×850(W)×620(D) mm

本体重量：約 120 kg

〔電氣的定格〕

定格電圧：100/240V

最大消費電力：750W

ヒューズ：3.15A

【使用目的又は効果】

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いるものである。

【使用方法等】

操作方法については、使用説明書「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 使用前に「ユーザーズマニュアル」の「医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項」をよく読んで、十分に注意すること。
2. 本体は多湿、直射日光を避け、室温で風通しのよい屋内で使用する。
3. 本体を使用した際に発生する粉塵による人体への影響を避ける為、保護手袋、保護めがね、防塵マスク等を使用して、粉塵の吸入、接触を防ぐこと。
4. 本体を作動させる際は、必ずフードを閉じること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本体専用の付属品又は交換品のみを使用すること。
2. 本体、付属品に破損・変形等の異常があった場合は使用しないこと。
3. 本体を設置の場合は、単独の電源を使用すること。
4. 本体の表面をクリーニングする際は事前にスイッチを切り、プラグを抜くこと。
また、水分が浸入しないよう注意すること。
5. 故障の際、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 本体は、壁などに密着させず、十分離れた場所に設置すること。
3. 直射日光、温度、湿度、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
4. 火気の影響のない場所に本体を設置すること。
5. 本体を廃棄する際は、各自治体の規制に従うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に「ユーザーズマニュアル」のメンテナンスの項を必ず読むこと。
2. 本体及び部品は必ず定期点検を行うこと。
3. 定期的に本機器のメカニカルダメージを点検すること。
4. 可動部分の汚れは、ただちに除去すること。
5. しばらく使用しなかった本体を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
6. 本体を清掃する際には、電源コードを抜いた状態で、湿らせた柔らかい布を使用すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造国	ドイツ
製造業者	デグデント社
	DeguDent GmbH

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス	
電話番号	0120-789-123

使用説明書を必ずご参照ください。