

機械器具 63 歯科用ブローチ  
一般医療機器 歯科用クレンザー 35784000  
**メルファースピロクレンザー**

**【形状・構造及び原理等】**

種類：7種類

種類(φISO)	カラーコード
020	パープル
025	ホワイト
030	イエロー
035	レッド
040	ブルー
050	グリーン
060	ブラック

長さ：21mm

材質：下記のとおり。

本体	柄部
ステンレス鋼	耐熱プラスチック

**【使用目的又は効果】**

根管の形成、拡大又は抜髄を行うために用いる先細で刃付きの長い歯科用切断器具である。

[使用目的]

歯髄除去

**【使用方法等】**

1. 根管に合った適切なサイズを選択します。
2. 操作は、通法により行ってください。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
  - (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
  - (2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
  - (3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
  - (4) オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用前に本品の損傷の有無を確認すること。

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。  
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社  
製造国 スイス  
製造業者 メルファール インストルメント社  
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

\* 電話番号 0120-667-467