

機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用根管プラグ 41876000

メルファーフィンガープラグー

【形状・構造及び原理等】

種類: 8種類

種類	サイズ mm	カラーコード
1	0.7	グリーン
2	0.8	ブラック
3	0.9	ホワイト
4	1.0	イエロー
5	1.1	レッド
6	1.2	ブルー
7	1.3	グリーン
8	1.4	ブラック

先端部長さ(mm): 21

材質: ステンレス鋼

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
 製造国 スイス
 製造業者 メルファー インストゥルメント社
 Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
 電話番号 0120-789-123

【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具である。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

【使用方法等】

1. 根管の太さに合わせて適切なサイズを選択します。
2. 根管充填材の圧接は通法により行ってください。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - (1)付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - (2)洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
 - (3)消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - (4)オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に本品の損傷有無を確認すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。