

機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

## プレートベンダー

### 【形状・構造及び原理等】

種類: 1種類  
標準寸法: 全長 14 cm  
材質: ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いるものである。

### 【使用方法等】

1. 使用する前に滅菌が完了しているか確認してください。
2. 本品の先端把持部でワイヤ等を適用部位に合わせて曲げてください。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
  - (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
  - (2) 洗浄液から取出して水洗し、血液、組織などを完全に除去、消毒液に浸漬します。
  - (3) 消毒液から取出して水洗し、十分に水切りしてください。
  - (4) 滅菌バックに入れ、オートクレーブなどで滅菌してください。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造国	ドイツ
製造業者	コーラー社
	Kohdent Roland Kohler
	Medizintechnik GmbH & Co. KG

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

\* 電話番号 [0120-667-467](tel:0120-667-467)