

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

プレートカッター

【形状・構造及び原理等】

種類: 1種類
標準寸法: 全長 18 cm
材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用ワイヤー及び骨接合用プレートを切断する器具。

【使用方法等】

1. 使用する前に滅菌が完了しているか確認してください。
2. 本品の先端刃部でワイヤーなどを適用部位に合わせて、切断します。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - (2) 洗浄液から取出して水洗し、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
 - (3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - (4) 滅菌パックに入れ、オートクレーブなどで滅菌してください。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 ドイツ
製造業者 コーラー社
Kohdent Roland Kohler
Medizintechnik GmbH & Co. KG

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

* 電話番号 0120-667-467