

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用スチール切削器具 70743000
メルファーアクリリックカッターバルカナイト

【形状・構造及び原理等】

種類: 下記のとおり

頭部形状	タイプ	全長 mm	種類
ラウンド	CA用	24.30~27.10	4 (#1~#4)
	HP用	44.5	4 (#1~#4)
オーバル	HP用	39.00~40.20	3 (#1~#3)
シリンダー	CA用	28.0	2 (#1~#2)
	HP用	44.5	4 (#1~#4)
エッグ	CA用	28.30~29.70	2 (#1~#2)
	HP用	44.30~48.20	4 (#1~#4)
ペアー	CA用	28.30~32.20	4 (#1~#4)
	HP用	44.30~48.20	4 (#1~#4)
フレーム	CA用	30.50~35.00	4 (#1~#4)
	HP用	44.5	4 (#1~#4)
ロングバッド	CA用	28.30~32.20	4 (#1~#4)
	HP用	44.30~48.20	4 (#1~#4)
バッド	HP用	42.50~45.10	3 (#1~#3)

サイズ対比表

種類	#1	#2	#3	#4
φ(ISO)	050	060	070	080

材質: 炭素鋼

【使用目的又は効果】

スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具である。

【使用方法等】

1. 歯科用ハンドピースに装着し、回転させて研削します。
2. 高温にならないよう断続的に被研削物に押し付けてください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用中の回転数の変更は、バーが折れることがあるので、行わないこと。
2. ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
3. 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)などのあるものは使用しないこと。
2. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
3. 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
4. 金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 メルファーインスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
*電話番号 0120-667-467