

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ジェットフレッシュパウダー

【禁忌・禁止】

本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：粉末

成分：水酸化アルミニウム、香料

【使用目的又は効果】

粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

本材はデンツプライプロフェッショナル社製の歯面清掃器（キャビトロンシリーズ）に使用する歯面清掃用の専用粉末です。

使用前によく振ってください。

本材のご使用に際しては、歯面清掃器（キャビトロンシリーズ、プロフィジェットシリーズ）の使用説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けさせること。
- (2) 呼吸器疾患のある患者へ使用する場合は、事前に本材の使用を医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- (1) 歯肉や歯肉溝に直接噴射しないこと [気腫の発症を起こすおそれがある]。また、修復物のマージン部及び表面に直接噴射しないこと。
- (2) 長時間の使用は避けること。
- (3) 他の添加剤は加えないこと。
- (4) 本材を使用する際には、眼の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本材は、高温多湿な場所を避けて保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、容器に記載の有効期間までに使用すること。

[記載の有効期間は製造業者データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造国	アメリカ合衆国
製造業者	デンツプライ プロフェッショナル 社 DENTSPLY Professional

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467