

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう 70897020

スピードストーン

【形状・構造及び原理等】

規格：JIS T 6605（歯科用硬質石こう）
形状：粉末
成分： α 型半水石こう

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造国	アメリカ合衆国
製造業者	ディスカスデンタル社 Discus Dental, LLC

【使用目的又は効果】

歯科用硬質石こうであり、歯科技工物を作製するために模型材等に用いる。

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123

【使用方法等】

1. 混水量は、本材 100g に対して水 24ml の割合で計量する。
2. 20～30 秒間練和後、すぐに印象面に注入する。
3. 作業は 60～90 秒で行う。
4. 約 5 分で硬化する。
5. 注入後アルジネート印象材では 5～10 分以内で模型を取り出す。

【使用方法等に関する使用上の注意】

粉末は、計量前によくほぐしてから使用すること。
本材の使用後は、すぐにふたを閉めること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本材に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本材または練和物は、目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - (2) 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
 - (3) 本材の研削、研磨の際には、目を傷つけないよう防護メガネ等を使用すること。
 - (4) 他の製品との混用や他の容器への入れ替えは行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光、高温多湿の場所を避けた室内で密栓して保管すること。
歯科の従業者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
〔記載の有効期間は当社データによる。〕