

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材(70757000)
アストラテック インプラント 技工用器具

【禁忌・禁止】

・他社製品と組み合わせて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、インプラントの補綴及び技工操作に使用する器具である。なお、本品はいずれも未滅菌品である。

2. 種類

1)インプレッション ピックアップ

① インプラント用

品番 品名

22867 フィクスチャーインプレッション ピックアップ ショート
22868 フィクスチャーインプレッション ピックアップ ロング
24936 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ショート
24937 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ロング
24928 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ショート
24929 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ロング
24950 インプラント ピックアップ 3.0 ショート
24949 インプラント ピックアップ 3.0 ロング
24947 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ショート
24948 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング
24938 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ショート
24946 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ロング
24986 インプラント ピックアップ プロファイル ショート
24985 インプラント ピックアップ プロファイル ロング

② アバットメント用

品番 品名

22710 DA インプレッション ピックアップ4
22711 DA インプレッション ピックアップ5
22712 DA インプレッション ピックアップ6
22882 20° ユニアバットメント ピックアップ 4.3
22883 45° ユニアバットメント ピックアップ 4.3
22876 20° ユニアバットメント ピックアップ 5.5
22878 45° ユニアバットメント ピックアップ 5.5
24254 アングルドアバットメント ピックアップ
22439 ボールアバットメント ピックアップ

2)インプレッション トランスファー

品番 品名

24958 インプラントトランスファー 3.0 ロング
24959 インプラントトランスファー 3.5/4.0 ショート
24960 インプラントトランスファー 3.5/4.0 ロング
24956 インプラントトランスファー 4.5/5.0 ショート
24957 インプラントトランスファー 4.5/5.0 ロング
22068 20/45 ユニアバットメント トランスファー
25050 インプラント トランスファー プロファイル 4.5/5.0 ショート
25051 インプラント トランスファー プロファイル 4.5/5.0 ロング

3)ガイドピン

品番 品名

24970 インプラントガイドピン 3.0 ショート
24976 インプラントガイドピン 3.0 ロング
24968 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート
24969 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング
24966 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート
24967 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング
22190 アバットメントガイドピン M1.4 - 13 mm
22197 アバットメントガイドピン M1.4 - 16 mm
22198 アバットメントガイドピン M1.4 - 19 mm
22199 アバットメントガイドピン M1.4 - 22 mm

4)レプリカ

① インプラント用

品番 品名

22398 フィクスチャーレプリカ 3.5
22397 フィクスチャーレプリカ 4.0ST
24977 インプラントレプリカ 3.0
24978 インプラントレプリカ 3.5/4.0
24979 インプラントレプリカ 4.5/5.0
25047 インプラントレプリカ プロファイル

② アバットメント用

品番 品名

22265 DA レプリカ ウルトラ 3.5
22266 DA レプリカ ウルトラ 4.0
22054 DA レプリカ4
22064 DA レプリカ5
22065 DA レプリカ6
22069 アバットメントレプリカ ユニ 20°
22070 アバットメントレプリカ ユニ 45°
24227 アバットメントレプリカ アングルド
22505 ボールアバットメント レプリカ

5)バーンアウトシリンダー

品番 品名

22372 DA バーンアウトシリンダー4
22373 DA バーンアウトシリンダー5
22379 DA バーンアウトシリンダー6
22186 バーンアウトシリンダー ユニ 20°
22187 バーンアウトシリンダー ユニ 45°
22448 バーンアウトシリンダー アングルド

6)ラボスクリュー

品番 品名

24802 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.4 (2入)
24857 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6 (6入)
24858 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2 (6入)
24859 ラボ ブリッジスクリュー ヘックス&スロット (各3入)
24860 ラボ アバットメントスクリュー アングルド (M1.6、M2 各2入)

7)ポリッシングプロテクター

品番 品名

22471 ポリッシングプロテクター ユニ 20° (10 入)
22474 ポリッシングプロテクター ユニ 45° (10 入)

8)グラインディングデバイス

品番 品名

22170 グラインディングデバイス ユニ 20°
22820 グラインディングデバイス シリンダー

9)その他の器材

品番 品名

22084 O リング, スペーサー ボールアバットメント用 (10 入)

10)その他

スペーサー ロング
スペーサー ショート

3. 材質

本システムを構成する各製品の材質は以下の通り。

材質	品名
チタン合金	ラボスクリュー インプラント ピックアップ インプラントトランスファー インプラントレプリカ インプラントガイドピン
ポリプロピレン	ボールアバットメント ピックアップ DA インプレッション ピックアップ
ステンレス鋼	アングルドアバットメント ピックアップ ユニアバットメント ピックアップ ユニアバットメント トランスファー アバットメントガイドピン フィクスチャーレプリカ アバットメント用レプリカ ポリッシングプロテクター
PMMA	バーンアウトシリンダー
タングステンカーバイト	グラインディングデバイス
NBR	O リング スペーサー
すず	スペーサー

【使用目的又は効果】

本品は、アストラテック インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

インプラントの補綴及び技工操作に用いる。

【使用上の注意】

本品は、マニュアルに規定されているインスツルメント及びコンポーネント
と共に補綴治療の術式においてのみ使用すること。

1. 重要な基本的注意

- 1) インプラント治療を行うに際し、治療法・危険性あるいは代替治療等について患者に十分な説明を行い、同意を得ること。
- 2) 臨床的に記録された治療手順に従うこと。
- 3) 外科処置に使用する際は、必ず洗浄・滅菌をすること。
- 4) 必要に応じて滅菌する際は、高圧蒸気滅菌を行うこと。
＜滅菌条件＞ 温度:134℃ 3分以上
- 5) 使用中は常に患者の全身及び口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は直ちに治療をやめ、適切な処置を行い、患者の安全を確保し回復を図ること。
- 6) 術中に患者が本品を誤飲しないように本品に予め適切な処置をし、十分注意して使用すること。
- 7) 他社製品と組み合わせて使用しないこと。
- 8) 本品に無理な負荷をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で常温保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の手に触れないように保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

**電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)