

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

## オッセオスPEEDEV 技工用器具

\*再使用禁止 (レプリカのみ)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 種類

##### (1) インプレッション ピックアップ

###### ① インプラント用

品番 品名

25513 インプラント ピックアップ EV 3.0 ロング  
25515 インプラント ピックアップ EV 3.6 ロング  
25516 インプラント ピックアップ EV 3.6 ショート  
25517 インプラント ピックアップ EV 4.2 ロング  
25518 インプラント ピックアップ EV 4.2 ショート  
25519 インプラント ピックアップ EV 4.8 ロング  
25520 インプラント ピックアップ EV 4.8 ショート  
25522 インプラント ピックアップ EV 5.4 ショート  
25600 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.2 ロング  
25601 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.2 ショート  
25602 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.8 ロング  
25603 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.8 ショート  
25523 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.0  
25524 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.6  
25978 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.6 ショート  
25525 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.2  
25979 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.2 ショート  
25526 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.8  
25980 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.8 ショート  
25527 インプラント ピックアップ デザイン EV 5.4  
25981 インプラント ピックアップ デザイン EV 5.4 ショート  
25604 インプラント ピックアップ デザイン プロファイル EV 4.2  
25605 インプラント ピックアップ デザイン プロファイル EV 4.8  
26231 インプラント ピックアップ EV 3.0 ロング  
26232 インプラント ピックアップ EV 3.6 ロング  
26227 インプラント ピックアップ EV 3.6 ショート  
26233 インプラント ピックアップ EV 4.2 ロング  
26228 インプラント ピックアップ EV 4.2 ショート  
26234 インプラント ピックアップ EV 4.8 ロング  
26229 インプラント ピックアップ EV 4.8 ショート  
26230 インプラント ピックアップ EV 5.4 ショート  
26239 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.0 ロング  
26240 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.6 ロング  
26235 インプラント ピックアップ デザイン EV 3.6 ショート  
26241 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.2 ロング  
26236 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.2 ショート  
26242 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.8 ロング  
26237 インプラント ピックアップ デザイン EV 4.8 ショート  
26243 インプラント ピックアップ デザイン EV 5.4 ロング  
26238 インプラント ピックアップ デザイン EV 5.4 ショート  
26260 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.2 ロング  
26258 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.2 ショート  
26261 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.8 ロング  
26259 インプラント ピックアップ プロファイル EV 4.8 ショート  
26262 インプラント ピックアップ デザイン プロファイル EV 4.2 ロング  
26263 インプラント ピックアップ デザイン プロファイル EV 4.8 ロング

###### ② アバットメント用

品番 品名

25396 DA EV インプレッション ピックアップ Ø3.3  
25397 DA EV インプレッション ピックアップ Ø4  
25398 DA EV インプレッション ピックアップ Ø5  
25399 DA EV インプレッション ピックアップ Ø6  
25641 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø4.3  
25552 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø4.3 ショート  
25642 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø5.5  
25553 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø5.5 ショート  
25651 アングルドアバットメント EV ピックアップ

26244 アングルドアバットメント EV ピックアップ

26247 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø4.3

26245 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø4.3 ショート

26248 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø5.5

26246 ユニアバットメント EV ピックアップ Ø5.5 ショート

##### (2) インプレッション トランスファー

###### ① インプラント用

品番 品名

25534 インプラント トランスファー EV 3.0 ロング  
25535 インプラント トランスファー EV 3.6 ショート  
25536 インプラント トランスファー EV 3.6 ロング  
25537 インプラント トランスファー EV 4.2 ショート  
25538 インプラント トランスファー EV 4.2 ロング  
25539 インプラント トランスファー EV 4.8 ショート  
25540 インプラント トランスファー EV 4.8 ロング  
25541 インプラント トランスファー EV 5.4 ショート  
25542 インプラント トランスファー EV 5.4 ロング  
25606 インプラント トランスファー プロファイル EV 4.2 ショート  
25607 インプラント トランスファー プロファイル EV 4.2 ロング  
25608 インプラント トランスファー プロファイル EV 4.8 ショート  
25609 インプラント トランスファー プロファイル EV 4.8 ロング

###### ② アバットメント用

品番 品名

25646 ユニアバットメント EV トランスファー  
26249 ユニアバットメント EV トランスファー ヘックス

##### (3) ガイドピン

###### ① ラボアバットメントスクリューEV 接続用

品番 品名

25528 ラボ ガイドピン デザイン EV 3.0/3.6  
25530 ラボ ガイドピン デザイン EV 4.2/4.8/5.4

###### ② ユニアバットメントEVレプリカ 接続用

品番 品名

25643 ラボ アバットメントガイドピン EV ショート  
25644 ラボ アバットメントガイドピン EV インターメディエイト  
25645 ラボ アバットメントガイドピン EV ロング

##### (4) レプリカ

###### ① インプラント用

品番 品名

25543 インプラント レプリカ EV 3.0  
25544 インプラント レプリカ EV 3.6  
25545 インプラント レプリカ EV 4.2  
25546 インプラント レプリカ EV 4.8  
25547 インプラント レプリカ EV 5.4  
25610 インプラント レプリカ プロファイル EV 4.2  
25611 インプラント レプリカ プロファイル EV 4.8

###### ② アバットメント用

品番 品名

25401 DA EV レプリカ Ø3.3  
25402 DA EV レプリカ Ø4  
25403 DA EV レプリカ Ø5  
25404 DA EV レプリカ Ø6  
25615 ユニアバットメント EV レプリカ  
25652 アングルドアバットメント EV レプリカ  
25826 ボールアバットメントEV レプリカ

取扱説明書を必ずご参照下さい。

(5) パーンアウトシリンダー

| 品番    | 品名                          |
|-------|-----------------------------|
| 25406 | DA EV パーンアウトシリンダー Ø3.3      |
| 25407 | DA EV パーンアウトシリンダー Ø4        |
| 25408 | DA EV パーンアウトシリンダー Ø5        |
| 25409 | DA EV パーンアウトシリンダー Ø6        |
| 25649 | ユニアバットメント EV パーンアウトシリンダー    |
| 25655 | アングルドアバットメント EV パーンアウトシリンダー |

(6) ラボスクリュー

① インプラントレベル

| 品番    | 品名                          |
|-------|-----------------------------|
| 25476 | ラボ アバットメントスクリュー EV 3.0 (3入) |
| 25477 | ラボ アバットメントスクリュー EV 3.6 (3入) |
| 25478 | ラボ アバットメントスクリュー EV 4.2 (3入) |
| 25479 | ラボ アバットメントスクリュー EV 4.8 (3入) |
| 25480 | ラボ アバットメントスクリュー EV 5.4 (3入) |

② アバットメントレベル

| 品番    | 品名                   |
|-------|----------------------|
| 25656 | ラボ ブリッジスクリュー EV (3入) |

(7) ポリッシングプロテクター

| 品番    | 品名                   |
|-------|----------------------|
| 25778 | ポリッシングプロテクター EV (3入) |

2. 材質

本システムを構成する各製品の材質は以下の通り。

| 品名                                                                                                                                                                                                    | 材質      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| インプラント ピックアップ EV<br>インプラント トランスファー EV<br>インプラント レプリカ<br>DA EV レプリカ<br>ラボ アバットメントスクリュー EV<br>ラボ ブリッジスクリュー EV                                                                                           | チタン合金   |
| DA EV インプレッション ピックアップ                                                                                                                                                                                 | ポリプロピレン |
| ユニアバットメント EV ピックアップ<br>アングルドアバットメント EV ピックアップ<br>ユニアバットメント EV トランスファー<br>ラボ アバットメントガイドピン EV<br>ラボ ガイドピン デザイン EV<br>ユニアバットメント EV レプリカ<br>アングルドアバットメント EV レプリカ<br>ボールアバットメント EV レプリカ<br>ポリッシングプロテクター EV | ステンレス鋼  |
| DA EV パーンアウトシリンダー<br>ユニアバットメント EV パーンアウトシリンダー<br>アングルドアバットメント EV パーンアウトシリンダー                                                                                                                          | PMMA    |

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

- ・インプラント補綴及び技工操作に用いる。
- ・本品は未滅菌のため、口腔内に適用する前に必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。滅菌方法は以下の通り。

＜洗浄と滅菌方法＞

超音波浴(洗浄剤と水の混合液)で洗浄した後、高圧蒸気滅菌を行うこと。  
(滅菌条件の目安: 予備真空方式高圧蒸気滅菌器、134℃、3 分間)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- ・使用の際は適切な保護衣等を着用すること。
  - ・未発達な顎骨に使用する際は十分な診査・診断を行うこと。
  - ・本品は未滅菌のため、口腔内に適用する前に必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。分解可能な器具は分解しておくこと。
- 高圧蒸気滅菌による滅菌が可能である。
- ・本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。

- ・本品は、強い応力やひねりを加えると変形・破損することがあるので、取り扱いに十分注意すること。
- ・本品の洗浄の際は、ナイロン製ブラシ等を使用し、洗浄後は流水下ですすぐこと。

2. 相互作用

- ・マニュアルに規定されているインスツルメント及びコンポーネントのみ併用すること。
- ・本品は、アストラテックインプラントシステムEV専用技工用器具のため、他のアストラテックインプラントシステムの補綴・技工操作には用いないこと。

3. 不具合・有害事象

- ・アレルギー
- ・オッセオインテグレーションの喪失
- ・オッセオインテグレーション不良
- ・感覚麻痺
- ・感染
- ・機能障害
- ・血腫、腫脹
- ・口腔粘膜損傷
- ・骨壊死
- ・骨欠損
- ・骨折
- ・審美障害
- ・脱落
- ・知覚異常、知覚過敏、知覚不全
- ・疼痛
- ・動揺
- ・破折
- ・破損
- ・発疹
- ・浮腫
- ・咀嚼機能麻痺

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- ・本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:  
デンツプライシロナ株式会社

\*\*電話番号 0120-667-467

製造業者:  
Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)  
Dentsply IH AB (スウェーデン)

取扱説明書を必ずご参照下さい。