

機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材（70757000）

再使用禁止

ロケーター 技工用器具

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ロケーターアバットメントレプリカ／アナログ

種類：2種類

- ・ロケーターアバットメントレプリカ／アバットメントアナログ D4
- ・ロケーターアバットメントアナログ D5

材質：アルミニウム

ロケーター アバットメントピックアップ／インプレッションコーピング

種類：1種類

材質：アルミニウム

ロケーター ブラックプロセッシング インサート

種類：1種類

材質：ポリエチレン

ロケーター プロセッシングスペーサー

種類：1種類

材質：ポリオキシメチレン

ロケーター ブロックアウトスペーサー

種類：1種類

材質：シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

ロケーターアバットメントレプリカ／アナログ

印象採得後のコンポーネントを適応するアナログに装着して、印象面に戻し、通法に従い作業模型を製作する。

ロケーター アバットメントピックアップ／インプレッションコーピング

アルミ製ハウジングのインプレッションポストとブラックプロセッシングインサートを使用して印象採得を行う。

ロケーター プロセッシングスペーサー

デンチャー作製の際に、チェアサイドでのプロセッシングキャップ取り込み用のスペースを確保するために使用する。

ロケーター ブロックアウトスペーサー

印象採得及びデンチャー作製の際に、印象材、固定用レジン等がアンダーカットに入り込まないようにするために使用する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本品は未滅菌のため、口腔内に適用する前には適切な洗浄、消毒を行うこと。
- ・本品は、強い応力やひねりを加えると変形・破損することがあるので、取り扱いに十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

製造業者：

ZEST ANCHORS LLC

（アメリカ合衆国）

＊ 〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス

電話番号 0120-667-467