

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)
コノメトリックアバットメント 技工用器具

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.コノメトリック アナログ

種類	品番	材質
φ 3.3	31047210	ステンレス鋼
φ 4.5	31072020	

2.コノメトリック ラボキャップ

種類	品番	材質
φ 3.3	31072121	チタン合金
φ 4.5	31072123	

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

- 1.所定の位置に収まるまで、コノメトリック アナログを印象内のコノメトリック インプレッションキャップ※に押し込む。この際、印象材が挟まれていることを確認する。
- 2.取り外し可能な歯肉マスクを使用して作業用模型を製作する。
- 3.コノメトリック ラボキャップを模型上のコノメトリック アナログに装着し、しっかりと固定されていることを確認する。
- 4.コノメトリック ラボキャップを支台として最終補綴物(クラウン)を製作する。

※は以下の医療機器の構成品である。

販売名	届出番号
コノメトリックアバットメント 補綴用器具	13B1X10236Y05600

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.コノメトリック ラボキャップは加工・改造しないこと。
- 2.適用あるいは使用に関して不明な点がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- 1.本品は、使用するまで元の包装のまま室温で保管すること。
- 2.直射日光にさらさないこと。
- 3.本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- 4.本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

*電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)