

*2026 年 2 月 (第 2 版)
2023 年 7 月 (第 1 版)

届出番号:13B1X10236Y05710

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)
DSインプラント 技工用器具

再使用禁止(インプラント アナログ EV)

【禁忌・禁止】

インプラント アナログ EV は再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:デンツプライシロナ株式会社

製造業者:シロナデンタルシステムズ

(Sirona Dental Systems GmbH)

デンツプライアイエイチイービー

(Dentsply IH AB)

製造国:ドイツ、スウェーデン

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

* 電話番号 0120-667-467

【形状・構造及び原理等】

1.インプラント アナログ EV

品番	サイズ	色	原材料
68014034	(XS)	緑	チタン合金
68014035	(S)	紫	
68014036	(M)	黄	
68014037	(L)	青	
68014038	(XL)	茶	

2.ラボ アバットメントスクリュー EV

品番	サイズ	色	原材料
68014029	(XS)	緑	チタン合金
68014030	(S)	紫	
68014031	(M)	黄	
68014032	(L)	青	
68014033	(XL)	茶	

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1.インプラント アナログ EV

- 1)ヘックスドライバーを使用し、手指(5～10Ncm)でインプラント アナログ EV を印象用コンポーネントに取り付ける。
- 2)石膏を印象に注ぐ。
- 3)ヘックスドライバーを使用して、インプラント アナログ EV から印象用コンポーネントを取り除き、模型から取り外す。

2.ラボ アバットメントスクリュー EV

- 1)ヘックスドライバー及びラボ アバットメントスクリュー EV を使用し、アバットメントを模型上のインプラント アナログ EV に手指(5～10Ncm)で取り付ける。
- 2)上部構造を作製する。
- 3)ラボ アバットメントスクリュー EV を緩め、模型からアバットメントを取り外す。

【使用上の注意】

[相互作用]

取扱説明書に規定されているインスツルメント及びコンポーネントとのみ併用すること。

[不具合・有害事象]

コンポーネントの破折、破損

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- 1.使用するまで元の包装のまま室温で保管すること。
- 2.直射日光にさらさないこと。
- 3.汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- 4.歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。