


機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000

クラウンオープナー

【形状・構造及び原理等】

形状:

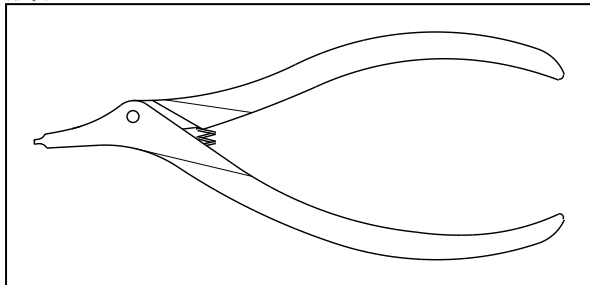

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる。

【使用目的】

クラウン、ブリッジ除去に用いる

【使用方法等】

1. 除去するクラウン、ブリッジに頬側面（舌側）から咬合面にかけてバーで 1mm 強のスリットを入れます。
2. スリットにクラウンオープナー先端部を挿入して徐々に握り込み、剥離させて除去します。
3. 先端部をスリットに挿入しにくいときは、クラウンオープナーの上下を入れ替えてご使用ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品使用の際は、歯牙へのダメージを避けるため、先端部を挿入したスリットには急激に過度の力をかけないこと。様子を見ながら徐々に握力をかけること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
4. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 洗浄後は、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。また、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
3. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
4. 血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 血液、体液、組織及び薬品等が付着した場合は、直ちに防錆洗浄液や精製水に浸漬すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その説明書に従うこと。
3. 塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに洗い流すこと。

4. 腐食（錆）の原因となるため、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
5. 洗浄の際は、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等、腐食（錆）の原因となる鋼製工具を使用しないこと。
6. 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
7. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
8. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
9. 滅菌前に、汚れ、傷、曲がり、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
10. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。
11. 高圧蒸気滅菌は、滅菌・乾燥とも 135℃以下で行うこと。
12. 薬剤等を使用した滅菌は、著しく金属を腐食させることがあるので、精製水を使用した高圧蒸気滅菌を推奨する。
13. 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造業者 株式会社 シオダ

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123