


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

モデルリムーバ

【形状・構造及び原理等】

形状：

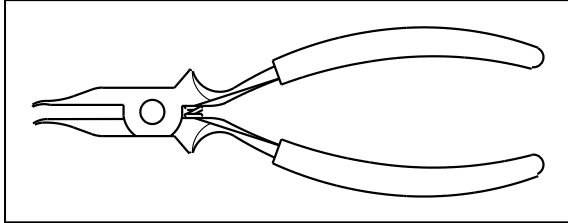

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

【使用目的】

硬化終了した石膏模型、耐火埋没材、エポキシ模型を印象材から、破損せずに容易に外すことができる。

【使用方法等】

1. 先端部を模型と印象材の間に挿入します。
2. 把持部に徐々に力を入れ模型と印象材を離解させます。
3. 挿入、離解部位は、1 箇所には偏らず数箇所設け、全体を平均的に外します。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造業者	株式会社 シオダ

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス	
電話番号	0120-789-123