


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000
モデルリムーバ

【形状・構造及び原理等】

形状:

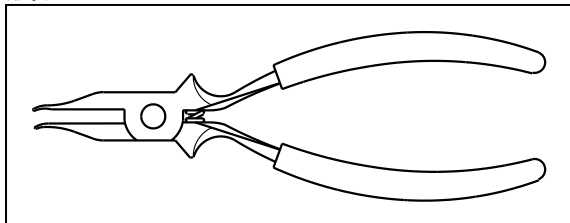

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

[使用目的]

硬化終了した石膏模型、耐火埋没材、エポキシ模型を印象材から、破損せずに容易に外すことができる。

【使用方法等】

1. 先端部を模型と印象材の間に挿入します。
2. 把持部に徐々に力を入れ模型と印象材を離解させます。
3. 挿入、離解部位は、1箇所には偏らず数箇所設け、全体を平均的に外します。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工(改造)は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造業者 株式会社 シオダ

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467