


機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000  
**バー捻転鉗子**


**【形状・構造及び原理等】**

形状:

1. No.1 (左)

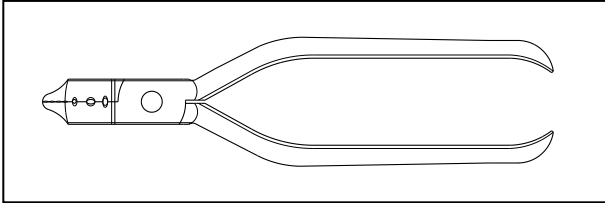

2. No.2 (右)

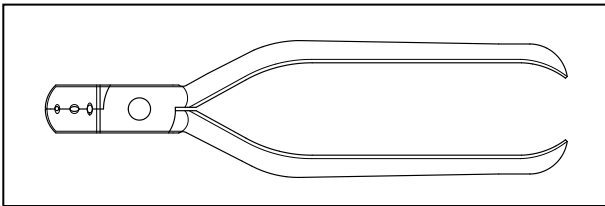

\*材質: ステンレス鋼

**【使用目的又は効果】**

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

[使用目的]

バーの末端維持部の適合に使用する。頭部はバーの保持固定が完全にできるような溝が切り込まれており、屈曲時の安定がよく、任意の角度に捻転できる。

**【使用方法等】**

No.1 (左) と No.2 (右) でバーを挟み片方の手は固定し、一方の手で任意の角度に捻転を行います。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工(改造)は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管の条件]

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社  
製造業者 株式会社 シオダ

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

\*\*電話番号 0120-667-467