


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

クラスプ鉗子


【形状・構造及び原理等】

形状：

1. No.1

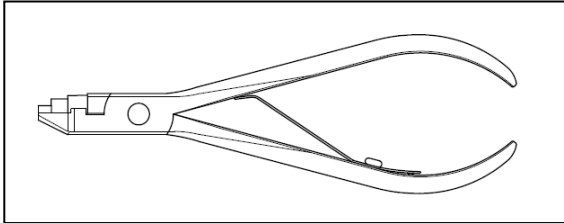

2. No.2

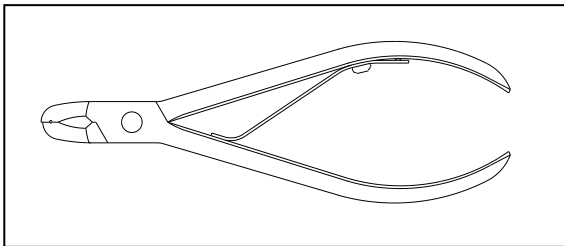

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

[使用目的]

クラスプ線の細部を適切に屈曲する。頭部は特殊な形態をしており、緩急自在の屈曲ができる。

【使用方法等】

先端片方の受け棚にクラスプ線を当て、握り込みます。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造業者 株式会社 シオダ

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123