


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

T K クラスプ 鉗子


【形状・構造及び原理等】

形状：


1. 1 号

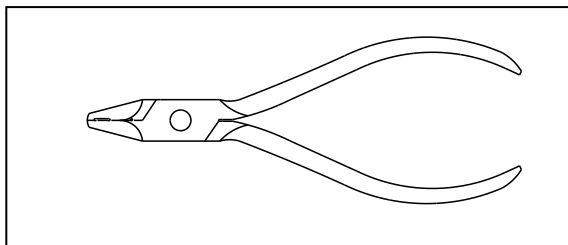

2. 2 号

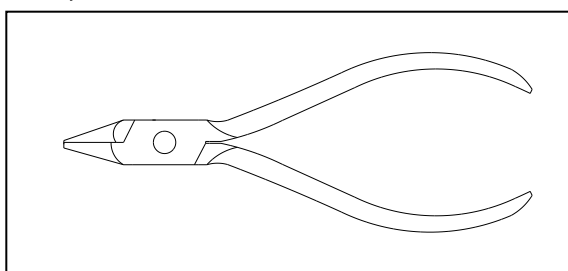

3. 3 号

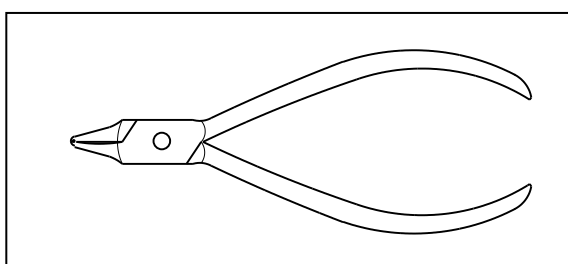

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

【使用目的】

鉤脚が簡単に屈曲（1 号）でき、鉤腕屈曲の際に鉤体と鉤脚部を乱さないように固定できる。鉤細部の屈曲（2 号、3 号）、アイバーの屈曲（2 号）ができる。

【使用方法等】

1. 鉤脚の長さを決定し、その位置をプライヤーで確實強固に把持することにより、歯牙の傾斜角度に応じて屈曲します。
2. レスト線の入る間隔を平行に維持したまま屈曲する場合は、鉗子嘴部の 2mm 幅の平行線を利用して行います。
3. 鉤細部の屈曲は 2 号及び 3 号で、アイバーの屈曲は 2 号で行います。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造業者 株式会社 シオダ

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123