


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

TKクラスプ鉗子


【形状・構造及び原理等】

形状:


1. 1号

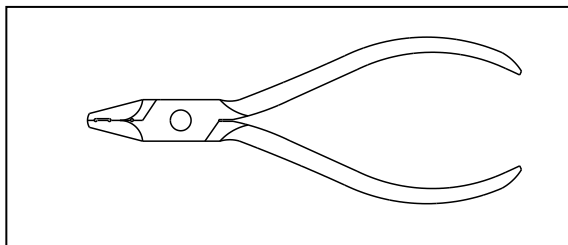

2. 2号

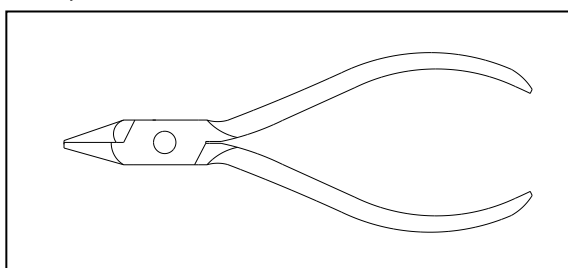

3. 3号

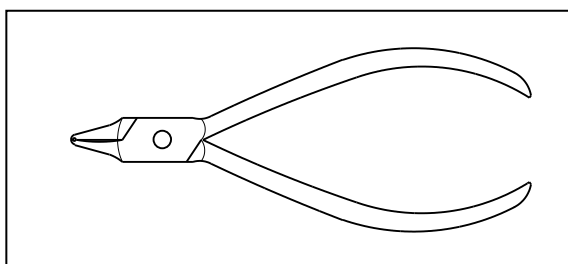

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

[使用目的]

鉤脚が簡単に屈曲(1号)でき、鉤腕屈曲の際に鉤体と鉤脚部を乱さないように固定できる。鉤細部の屈曲(2号、3号)、アイバーの屈曲(2号)ができる。

【使用方法等】

1. 鉤脚の長さを決定し、その位置をプライヤーで确实強固に把持することにより、歯牙の傾斜角度に応じて屈曲します。
2. レスト線の入る間隔を平行に維持したまま屈曲する場合は、鉗子嘴部の2mm幅の平行線を利用して行います。
3. 鉤細部の屈曲は2号及び3号で、アイバーの屈曲は2号で行います。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工(改造)は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造業者 株式会社 シオダ

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

*電話番号 0120-667-467