


機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

## 副木形成鉗子


### 【形状・構造及び原理等】

形状：

1. No.1

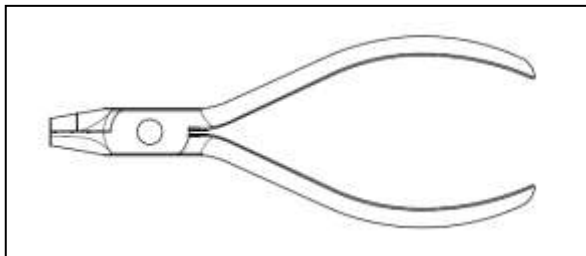

2. No.2S

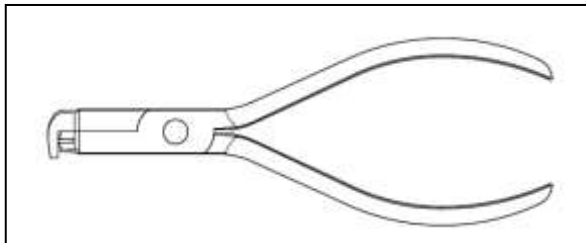

材質：ステンレス鋼

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

\*電話番号 0120-667-467

### 【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤー等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

[使用目的]

副木用線を使用し、歯槽膿漏動揺歯固定や顎骨骨折時の固定、又は動揺歯の固定、歯列矯正治療の保定等の装置作製時のワイヤー屈曲に使用する。

### 【使用方法等】

No.1には3箇所溝があり、No.2Sには溝と球面および直面がありますので、症例に応じて、そのいずれかの溝にワイヤーをはさみ強く握り込み屈曲します。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社  
製造業者 株式会社 シオダ