

トーマニューサージカルグローブパウダーフリー


「再使用禁止」

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止。

**【形状・構造及び原理等】

** 本品は、JIS T9107「使い捨て手術用ゴム手袋」に規定された天然ゴムラテックス製のパウダナシの滅菌済み手術用手袋です。

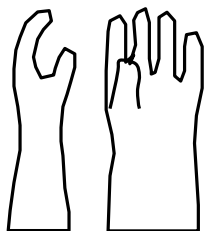

形状:S(直指型)
表面仕上げ:T(全面が粗面)

(単位 mm)

呼び番号	掌部の幅	最小全長	厚さ
5.5	72±5	250	0.13 以上
6	77±5	260	
6.5	83±5		
7	89±5	270	
7.5	95±5		
8	102±6		
8.5	108±6	280	

**【使用目的】

医科及び歯科で手術に用いる場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する滅菌済みの使い捨て形式の手袋です。

**【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

** 1. 使用注意

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状をおこした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 天然ゴムラテックスと接触する機会の多い方々は天然ゴムラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

** 2. 重要な基本的注意

- 1 双袋包装を開封したらすぐに使用してください。
- **●1 双袋包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
- **●使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
- ** 3. 相互作用
- この包装が開封されるか又はきず付けられるまで無菌です。
- 手袋は、薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。
- **●電気メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電気的絶縁性が損なわれ、火傷を起こすことがありますので注意してください。

**【保管方法及び使用期間等】

** 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や湿気を避けて保管してください。

** 2. 使用期限

* 滅菌後3年として使用期限を表示。(自己認証による)

【包装】

20 双入/箱

**【主要文献及び文献請求先】(添付文書請求先)

**三興化学工業株式会社 品質保証課

TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

**【製造販売業者及び製造業者の名称等】

** 販売

名称：宇都宮製作株式会社

住所：東大阪市本庄西1丁目5番1号

**製造販売業者

名称：三興化学工業株式会社

住所：広島県大竹市新町2丁目11番4号

連絡先：TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

**外国製造業者

名称：サンケムコーポレーション

SANCHEM CORPORATION SDN. BHD.

国名：マレーシア