

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード：70976000

エクセレントニトリル手袋 NBR-2600

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はニトリルゴム製のパウダーなし・未滅菌の単回使用の検査・検診用手袋です。

全長：230mm以上

厚み：0.05mm以上

形状：平手タイプ

表面仕上げ：T（表面の一部又は全てが粗面の手袋）

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に患者及び使用者を交差汚染から守るために使用します。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出し、着用します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- 体質・使用状況により、かゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（Ⅳ型－遅延型：主に添加剤等の化学物質による）を引き起こすことがあります。装着数時間後から症状が発現することがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

2) 重要な基本的注意

- 複数の患者に使用しないでください。
- 使用前、使用中に破損やピンホール等の異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 鋭利な器具に接触した場合、破れや穴があくことがありますのでご注意ください。

3) 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や多湿を避けて保管してください。

2) 有効期間

- 使用期限は別途記載しています。
〔自己認証（自社データによる）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

○ 製造販売業者

三興化学工業株式会社

広島県大竹市新町2丁目1番4号

TEL：0827-52-3111

○ 製造業者

ハルタレガ NGC

Hartalega NGC Sdn. Bhd.

（マレーシア）