


器11 放射線障害防護用器具

一般医療機器 放射線防護用手袋 JMDNコード：38364000

サブガードNS

【形状・構造及び原理等】

本品は、鉛化合物を含有したクロロブレンゴム製のパウダ付の未滅菌の放射線防護用手袋である。

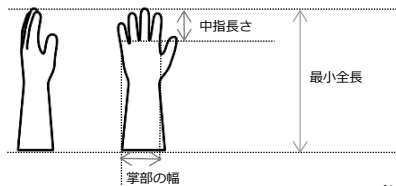

(単位：mm)

サイズ	中指長さ	掌部の幅	最小全長
7.0	74 ± 5	88 ± 5	280 以上
7.5	76 ± 5	94 ± 5	290 以上
8.0	78 ± 5	100 ± 5	
8.5	80 ± 5	106 ± 5	300 以上
9.0	82 ± 5	112 ± 5	

● 性能（遮蔽効果）

(JIS Z4501 100kVでの試験において)

サイズ	厚さ (mm)	鉛当量 (mmPb)
共通	0.35 ± 0.10	0.03 以上

● 物性

促進老化前	切断時引張強さ	9.8 MPa 以上
	切断時伸び	600 % 以上
促進老化後	切断時引張強さ	6.8 MPa 以上
	切断時伸び	420 % 以上

【使用目的】

術者や他の要員の手全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被爆から保護（減衰）する。

【使用方法等】

- 本品を開封後に使用する場合、手袋表面のパウダを十分に除去してから使用すること。
- 本品は未滅菌製品ではあるが、下記滅菌方法により滅菌が可能である。
 - ① エチレンオキシドガス滅菌
 - ② 高圧蒸気滅菌（滅菌条件：121℃、30分）
- 本品を折り曲げて高圧蒸気滅菌する場合、折り目やひび割れ等が発生することがある。
- 滅菌後、必ず事前確認を行い、硬化、ひび割れ等が認められた場合、使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- 体質・使用状況により、かゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（Ⅳ型－遅延型：主に添加剤等の化学物質による）を引き起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

2) 重要な基本的注意

- 使用前、使用中に破損やピンホール等の異常が認められた場合、直ちに使用を中止すること。
- 鋭利な器具に接触した場合、破れや穴があくことがあるので注意すること。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤や浸透することがあるため、必ず事前に確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や多湿を避けて保管すること。

2) 有効期間

- 本品の包装に記載
[自己認証（自社データによる）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
三興化学工業株式会社
広島県大竹市新町2丁目11番4号
TEL：0827-52-3111