

機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 カテーテルコネクタ(32339000)

## コンスタントコネクティングチューブ

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 滅菌袋に破損や本品に異常が認められた場合は使用しないこと
- 複数の患者に使用しないこと[感染のおそれがある]
- 本品にアルコール等の溶剤や消毒剤をながさないこと[ひび割れの原因となる]


#### 【形状・構造および原理等】

##### 1.形状・構造

○コンスタントコネクティングチューブ S

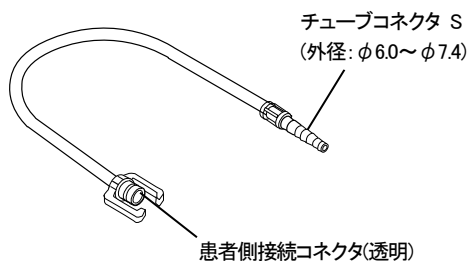

○コンスタントコネクティングチューブ L

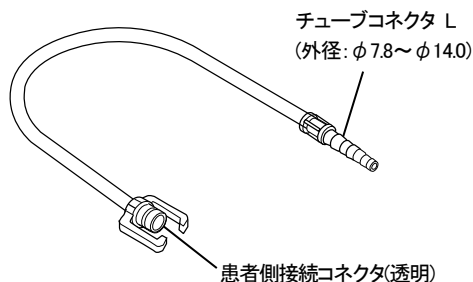

##### 2.原理

本器を患者ドレーンと排液バックの間に接続する。さらに、排液バックと電動式低圧吸引器を接続する。電動式低圧吸引器より陰圧をかけることで、患者ドレーンから本器を経由し、排液バックへと吸引された液体が移送する。

#### 【使用目的又は効果】

本器は胸腔又は胸腔ドレーン等のカテーテル類を排液バック等の容器へ接続するために用いるコネクタである。

#### 【使用方法等】

本器の使用には以下の併用医療機器を用いて下さい。

販売名	認証/届出番号
コンスタント Neo	305ADBZX00033000
コンスタント排液バック	11B1X00012000025

排液バックと適合する胸腔又は腹腔ドレーン等に接続し使用する。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

- 在宅において使用する場合は、医師または医療従事者の指導に基づき使用すること。
- 本品はEOG滅菌済みである。滅菌袋が破損していた場合や、製品に異常が見られる場合は使用しないこと。
- 本品に記載されている有効期限を確認し、有効期限が過ぎているものは使用しないこと。
- 本品開封後は速やかに使用すること。
- 使用前、接続部にしっかりチューブ等が差し込まれていることを確認し、使用中は本品に破損、接続部に緩み及び液漏れが無いが定期的に確認すること。
- コネクタ部の径に適合するサイズのカテーテル等を使用すること[接続不良による漏れや外れの原因となる]
- 本器は周囲温度 10~40℃、相対湿度 30~75%の環境で使用すること。
- 他の医療機器と合わせて使用する際は、必ず安全確認を行ってから使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管条件

- 日光、ほこり、塩分、水濡れ、高温、高湿になる場所は避けること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

##### 有効期間

- 袋に記載(自己認証(当社データ)による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売元:株式会社Sanko Medical

埼玉県さいたま市西区中釘 652 番地 048-624-8121

外国製造業者:蘇州市亜新医療用品 有限公司(中華人民共和国)

(Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd.)