

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ハトブラシ（ハンドピース用）

【形状・構造及び原理等】

1. 形 状※2、※3

ハンドピース用
概要形態図



2. 仕 様

軸部形式：φ2.34mm HP用

軸部の長さ：スタンダード

材 質※2、※3

品 番	材 質
#R4～R8、R12、R17、R16,R19	豚 毛
#R1～R3、R15、R18、R22	山羊毛
#R9～R11、R13、R14、R20	ワイヤー
#W7	マイクロファイバー
#W1、W6	綿 糸
#W2	モスリン
#W3	フランネル
#W4、F1～F6	フェルト
#W5	鹿 皮
#W8	シリコンコートされたモスリン
#R21	山羊毛 マイクロファイバーレザー
#W9	ゼタコットン(化学繊維)

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

歯科補綴物等の研磨に使用する。

2. 効果

レジン・ポーセレン・スルホン、そして貴金属から硬質メタルにいたる
広域な材料に対しての仕上げの研磨ができる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、
表示使用回転数で回転させて、歯科用研磨材を塗りながらソフトタ
ッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) メーカーの指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入して、半
チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりす
ることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けるこ
と。

【使用上の注意】

- 1) 表示使用回転数を超えた過度の使用はしないこと。
- 2) 損傷、変形(錆、曲り、表面キズ、汚染)等のあるものは使用し
ないこと。
- 3) 本材を使用する際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用す
ること。
- 4) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 排気装置を備えた環境で作業すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所
を避けて保管すること。
- 2) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない場所に保管
すること。
- 3) 本材は腐食性のある化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所
を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社

製造業者：HATHO GmbH

国 名：ドイツ連邦共和国