

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ハトー アクリポル セット

【形状・構造及び原理等】※

1. 形 状



2. 原 理

本材は、レジン・ハイブリッドレジンのツヤ出しが素早くできるセットである。

3. 仕 様

品番/項目	#9280 (L21)	#520-100/7 (L23)	#156-80HS (L25)	ハトーページ
材 質	豚毛+スコッチ	マイクロファイバー	綿糸バフ	コンパウンド*
寸 法	φ80mm	φ100mm	φ80mm	85g
使用回転数	1,400rpm	1,400rpm	1,400rpm	—

【使用目的又は効果】※

使用目的

歯科用レジン・ハイブリッドレジンの義歯の研磨に使用する。

【使用方法等】

使用方法

- カーバイドバー等で、アクリル義歯のバリ取りを行う。
- 本材#9280を歯科のレーズに装着し、ハトーポリスター ポリッシングペースト リンティグレイを付けて回転させて中研磨を行う。
- 中研磨を終えた後、#520-100/7のブラシに取り替えて、ハトーポリスター ポリッシングペースト ページュを付けながら仕上げの研磨を行う。
- 仕上げを終えたら、#156-80HSをレーズに装着して回転させ、コンパウンドを拭き取る。
- 2)～4)の作業は、軽いタッチで断続的に押しつけながら作業を行うこと。過度の加圧は、摩擦熱により研磨物の変形やブラシの焼き付けの原因になる。

【使用上の注意】

- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 目の損傷を防ぐ為に、保護メガネ等を使用して作業を行うこと。

- 3) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 排気装置を備えた環境で作業を行うこと。
- 5) 使用回転数（1,400r.p.m）を超えた使用は、摩擦熱でレジンに焦げや変形が生じるので、過度の回転数で使用しないこと。
- 6) アクリルの発熱や破損を避ける為に、軽い圧力で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は、火気を避け外圧（物理的負荷）や、落下のおそれがない場所に、安定状態で保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、塩分、イオウ等分のガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 使用後のブラシやポリッシングディスクは必ず別々に収納して保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：サンデンタル株式会社
製造業者：HATHO GmbH
国 名：ドイツ