

ハトーポリスター ポリッシングペースト

【形状・構造及び原理等】

1. 形 状
固形状のワックスが容量によりプラスチック製丸型ケース、または長方形紙箱に収められている。



2. 組成
ステアリン酸、パラフィンワックス他
3. 性状
固形のワックスでわずかに特異なおいがある。
4. 種類***

色	対象物	用途	タイプ	容量
ブラウン	貴金属・非金属	荒研磨用	レギュラー	110g
			ラージ	370g
リンティ グレイ	シルバー・アクリルレジン・ コンポジット	荒研磨用	レギュラー	90g
			ラージ	280g
ホワイト	白銀・非金属・クローム・コバルト・ 軟性レジン	中研磨用	レギュラー	90g
			ラージ	290g
ベージュ	アクリルレジン・コンポジット	仕上げ用	レギュラー	85g
			ラージ	290g
ローズ	14 金・白銀・軟性レジン・ハイブリッ ドコンポジット・レジン	仕上げ用	レギュラー	75g
			ラージ	290g
グリーン	合金・クローム・コバルト	仕上げ用	レギュラー	90g
			ラージ	300g
レッド	18 金・白銀・チタン	仕上げ用	レギュラー	100g
		中研磨用	ラージ	300g
ブルー	白銀・非金属合金・クロームコバルト・ ハイブリッド・ナノコンポジット	仕上げ用	レギュラー	75g
			ラージ	290g

5. 原理
本材は、歯科用ポリッシングペーストで、歯科用ハンドピース（タービン）や、レーズ等の研磨用回転機器に取り付けた研磨用ブラシやバフの表面に、機器を回転させながら本材を塗布し、被研磨物に軽く断続的に押し当ててことで、研磨ツヤ出しができる。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的
歯科補綴物の研磨・ツヤ出しに使用する。

【使用方法等】

- 1) 歯科用のハンドピース（タービン）や、レーズ等のメーカーの指示に従って使用する研磨用ブラシやバフをしっかりと装着すること。
2) 機器を作動させ、ブラシやバフに本材を適量塗布すること。
3) 被研磨物に、軽いタッチで断続的に押し当てながら使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本材の使用により、発疹・皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し医師の診断を受けること。
2) 本材は、口腔内で使用しないこと。
3) 最適な研磨結果を得る為に、本材に使用したブラシ類は他の研磨材が付着しないよう、区別して個別に使用すること。
4) 作業の際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
5) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
6) 排気装置を備えた環境で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
1) 高温、多湿及びホコリや直射日光のあたるおそれのある場所を避けて室温で保管すること。
2) 化学薬品の保管場所や、塩分、イオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。
3) 本材に、他の研磨材が付着しないようにして保管すること。
4) 本材の使用後、フタをしっかり締めて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： サンデンタル株式会社
製 造 業 者： HATHO GmbH（ハトー社）
国 名： ドイツ連邦共和国