


キーストン レッドフラッシュ

【形状・構造及び原理等】※

1. 形 状

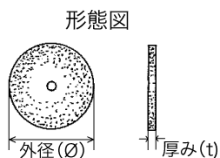

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)を受けない場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、塩分やイオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。

2. 原 理

本材はアブレイブの研削用ディスクで、市販のマンドレルに取り付け、歯科用エンジン、タービン、高速グラインダー等のチャックに装着し、回転させて使用することにより、スプルー線の切断や、ポーセレン・硬質レジン、クラウン等の歯冠分離や形成を行うことができる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社

製 造 業 者: Keystone Industries

国 名: アメリカ合衆国

3. 材質等

材 質 : 酸化アルミニウム、酸化鉄、酸化チタン、他

サイズ/最大許容回転数※※

外径 (φ)	厚み (t)	回転数
23.8mm	0.63 mm	25,000 rpm

【使用目的又は効果】

使用目的

主にスプルー線の切断、またクラウン・ポーセレン等の歯冠分離や形成に使用する。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 使用するディスクを適合するマンドレルに取り付ける。
- 2) メーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥までしっかり入れてチャックを締める。
- 3) 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 表示使用回転数以下で使用する。
- 5) ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削を行う。

【使用上の注意】

- 1) 損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 使用時は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
- 4) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 排気装置の備えた環境で作業すること。
- 6) 表示使用回転数を超えた使用は、本材が破折してけがをする恐れがあるので、過度の回転数で使用しないこと。
- 7) 無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。