

器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN31776000


コールミラー セット

【形状・構造及び原理等】

1. 形 状*

本品には、#1 咬合面用/#3 頬側面用と#3 頬側面用/#6 咬合面用の2種類の組み合わせがある。

形 態 図

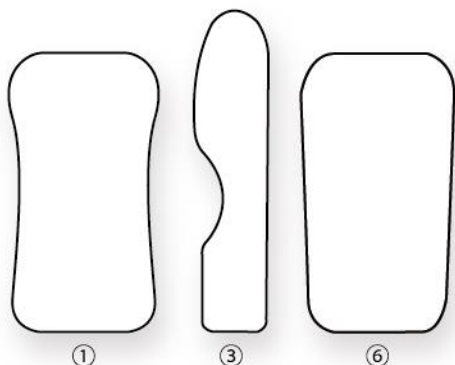

- 1) 規格: #1/#3
#3/#6

2. 組 成

- 1) 基材: ガラス製
- 2) メッキ: ロジウム

3. 原 理

ガラス両面にロジウムをメッキし鏡面仕上げしたもので、ガラス面の乱反射をなくし直接反射と光を吸収できることで、正確な実像を写し明るく美しい色の写真を撮ることができる。

【使用目的又は効果】

口腔内の撮影時に用いる。

【使用方法等】

口腔内でミラーが曇るときは、ミラーを 37℃前後に温めて使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品は未滅菌につき、オートクレーブで滅菌してから使用すること。
- 2) 本品は患者毎に滅菌してから使用すること。
- 3) 本品に損傷(表面のキズ、メッキの剥離、破損)等があるものは使用しないこと。
- 4) 本品はガラス製の為、衝撃を与えないよう注意すること。
- 5) 本品はガラス鏡面を保護する為、他のインスツルメントとの接触を避けること。
- 6) 本品を水や薬剤等に浸漬しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 本品は高温、多湿及び、ホコリや水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本品は、外圧(物理的負荷、振動、衝撃)及び、落下の危険がない安定した場所に保管すること。

- 3) 本品は、他のインスツルメントとの接触を避けて保管すること。
- 4) 本品は、腐食性のある化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 5) 本品は室温で、汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- 6) 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

損傷(表面のキズ、メッキの剥離、破損)等の有無を点検・確認し、該当するものがあれば使用を避けること。

2. 清掃・消毒**

- 1) 本品の清掃・消毒に際しては、ゴム手袋を装着すること。
- 2) 本品の使用後は、ガーゼや手を使い中性洗剤で水洗いした後、滅菌パックに入れオートクレーブで滅菌すること。本品の滅菌は、オートクレーブ製造社の使用説明書に従うこと。
- 3) 本品の清拭は、必ず柔らかい布等を使用すること。
- 4) グルタルール系・次亜塩素酸系は、表面のメッキが剥がれるおそれがある為使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社
製造業者: EVAPORATED METAL FILMS CORPORATION
国名: アメリカ合衆国

【販売元の氏名又は名称及び住所等】

販売元: 有限会社サンフォート
住所: 埼玉県坂戸市溝端町 17-20
TEL: (049)284-3636