

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

スレイクリス ワックス グリーン

【形状・構造及び原理等】* * *

1. 形 状



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社
製造業者: SLAYCRIS PRODUCTS 社
国名: アメリカ合衆国

2. 仕 様

形状: 缶入固形 56g
主成分: パラフィンワックス、蜜ろう、カルナウバワックス
色調: 濃緑(グリーン)

【使用目的又は効果】*

使用目的

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックスをいう。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本材を、加熱したインスツルメント等で適度に軟化させる。
- 2) 築造手順の通法に従い、補綴物のろう型を築成する。
- 3) 本材の過不足は、盛り足したり削ったりして調整する。
- 4) 築造後、カービングして補綴物のろう型を仕上げる。

【使用上の注意】

- 1) 本材は加熱を要するので、使用の際は火傷に注意すること。
- 2) 本材は、過度の加熱で使用しないこと。
- 3) 本材は可燃性につき、使用及び保管する場所には消火装置を備えること。
- 4) 本材を他のワックスに混ぜて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は、寒暖の差が少ない室温で保管すること。
- 2) 本材は、高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所等)での放置及び保管を避けること。
- 3) 本材は可燃性につき、保管場所には消火装置を備えること。
- 4) 本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。