

歯 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

## スレイクリス ワックス レッド

### 【形状・構造及び原理等】\* \* \*

#### 1. 形 状



### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社  
製造業者: SLAYCRIS PRODUCTS  
国名: アメリカ合衆国

#### 2. 仕 様

形状: 缶入固形 56g  
主成分: パラフィンワックス、合成ワックス  
色調: 赤(レッド)

### 【使用目的又は効果】\*

#### 使用目的

収縮がほとんどなく極めて安定性の高いワックスで、マージン部の縁を目立たせ、主として、床、パー、クラスプ等の鑄造用ろう型として用いる。内面マージン部分にも最適である。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- 1) 本材を、加熱したインストルメント等で適度に軟化させる。
- 2) 築造手順の通法に従い、補綴物のろう型を築成する。
- 3) 本材の過不足は、盛り足したり削ったりして調整する。
- 4) 築造後、カービングして補綴物のろう型を仕上げる。

### 【使用上の注意】

- 1) 本材は加熱を要するので、使用の際は火傷に注意すること。
- 2) 本材は、過度の加熱で使用しないこと。
- 3) 本材は可燃性につき、使用及び保管する場所には消火装置を備えること。
- 4) 本材を他のワックスに混ぜて使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- 1) 本材は、寒暖の差が少ない室温で保管すること。
- 2) 本材は、高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所等)での放置及び保管を避けること。
- 3) 本材は可燃性につき、保管場所には消火装置を備えること。
- 4) 本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。