

ゴールドマン エクスプローラー/プローブ

【形状・構造及び原理等】

ハンドル部：ステンレス鋼(SUS303)

作業部：ステンレス鋼(SUS302)



作業部

11/17・・・・・・・・・・1種類

【保管方法及び有効期間等】※1

- ①. 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ②. 本品は、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びる恐れがある。
湿度が低く清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】※1

製造販売業者：サンデンタル株式会社

製造業者：Goldman Products Inc.

国 名：アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

使用目的

本品のエクスプローラー部で表面・根形態の確認や、縁下歯石の探知・歯科診療で触診等のために使用し、他方のプローブ部で歯周ポケットの深さの測定、歯肉の出血の有無、歯肉の形態を把握出来るなど、歯周組織検査のために使用する。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、表面・根形態の確認や、縁下歯石の探知・歯科診療で触診等にはエクスプローラー部を患部にあてて使用し、歯周ポケットの深さの測定、歯肉の出血の有無、歯肉の形態を把握するにはプローブ部を患部にあてて使用する。

【使用上の注意】※1

- 1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- 2) 使用前は必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 3) 使用目的（手術、処置、技工を含む医療行為）以外は使用しないこと。
- 4) 使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。破損・曲がり等の原因になる。
- 5) オートクレーブ滅菌器の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具の鈍り・変形・劣化等の原因になる。
- 6) 本品を炎に晒す、他の目的に使用しないこと。過熱をすると変形・変色・破損等の原因になる。
- 7) 使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しない間に、直ちに洗浄液等に浸し、除去すること。
- 8) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 9) 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄する際は、洗浄物同士が接触して刃先を損傷する事がないよう注意すること。
- 10) 洗浄後、器具は十分乾燥させてから滅菌パック等に入れオートクレーブ滅菌（121℃ 141kPa 20分以上）