

MDL キャスティングワックス

【形状・構造及び原理等】*

1. 形 状



2. 原 理

本品は強力な粘着性と優れた操作性を有した鑄造用ワックスで、歯科の補綴物作製時のろう型として築成し鑄造することで、精巧な補綴物を作製することができる。

3. 仕 様

主成分 : パラフィン

色調／融解温度 : レッド	58℃～60℃
: ブルー	58℃～60℃
: グリーン	56℃～58℃
: アイボリー	56℃～58℃

【使用目的又は効果】

使用目的

主としてインレー、クラウン、ブリッジ等の鑄造用ろう型として用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本品を加熱したインスツルメント等で適度に軟化させる。
- 2) 築造手順の通法に従い、補綴物のろう型を築成する。
- 3) 築成後、カービングをして補綴物のろう型を仕上げる。

【使用上の注意】

- 1) 本品は加熱を要するので、使用の際は火傷に注意すること。
- 2) 本品は過度の加熱で使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性につき、使用及び保管する場所には消火装置を備えること。
- 4) 本品は他のワックスに混ぜて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 本品は直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 本品は可燃性につき、保管場所には消火装置を備えること。
- 3) 本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: サンデンタル株式会社

製造業者: MDL DENTAL PRODUCTS INC.

国名: アメリカ合衆国