

mAx 綿糸ポイント

【形状・構造等】

1. 形状・構造



の発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: サンデンタル株式会社

製造業者: 塩城市塩都区林海橡塑製品工場

製造所国名: 中華人民共和国

2. 仕様

軸部形式: $\phi 2.34\text{mm}$

研磨部材質: 綿

【使用目的又は効果】

使用目的

歯科補綴物等の研磨に使用する。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、表示使用回転数で回転させて、歯科用研磨材を塗りながらソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) メーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- 1) 表示使用回転数を超えた過度の使用はしないこと。
- 2) 損傷、変形(錆、曲がり、表面キズ、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用する際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
- 4) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 排気装置を備えた環境で作業すること。

【保管方法及び有効期間等】*

保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない場所に保管すること。
- 3) 本材は腐食性のある化学薬品の保管場所や、ガス