

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

メービス インレーワックス

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 仕様

組成：パラフィンワックス、カルナウバワックス、色素

色調：濃緑色

融解温度：59.4℃～61.1℃

種類	形状	容量
#1 ソフト	スティック	45g
#1 ソフト	スティック	453.59g
#1 ソフト	ブロック	453.59g
#2 ミディアム	スティック	45g
#2 ミディアム	スティック	453.59g
#2 ミディアム	ブロック	453.59g
#3 ハード	スティック	45g
#3 ハード	スティック	453.59g
#3 ハード	ブロック	453.59g

3. 原理

本材は、硬質な歯科用キャスティングワックスで、主にメタルインレーのワックスパターン採取に用い、そのろう型を鑄造することで、精巧な補綴物が作製できる。

【使用目的又は効果】

使用目的

主として、メタルインレーのワックスパターンの採取に用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本材を加熱軟化して、インレーの高洞に充填する。
- 2) インレー形成器を用いて、咬合面、隣接面などを歯牙の形態に修復し、ろう型を作製する。
- 3) 通法に従って鑄造を行う。

【使用上の注意】

- 1) 本材は加熱を要するので、使用の際は火傷に注意すること。
- 2) 本材は、過度の加熱で使用しないこと。
- 3) 本材を他のワックスに混ぜて使用しないこと。
- 4) ろう型採取後は、温度変化による変形を防ぐ為に、速やかに埋没すること。

- 5) 本材は可燃性につき、本材を使用及び保管する場所には消火装置を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は、寒暖の差が少ない室温で保管すること。
- 2) 本材を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所等)での放置若しくは保管を避けること。
- 3) 本材は可燃性につき、保管場所には消火装置を備えること。
- 4) 本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社

製造業者：MDL DENTAL PRODUCTS INC.

国 名：アメリカ合衆国