


ハトー アクリポル セット 2

【形状・構造及び原理等】

1. 形 状

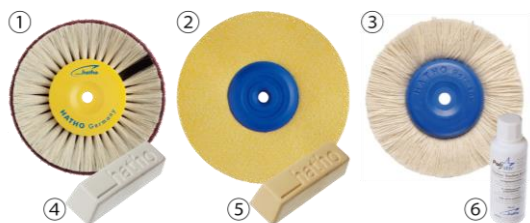

2. 原 理

本材は、レジン・ハイブリッドレジンのツヤ出しが素早くできるセットである。

3. 仕 様

	中研磨	光沢研磨	最終光沢研磨
品番 (ブラシ)	ハトーブラシ レース用		
	4280 (L33)①	520-100/7 (L23)②	152-80BW (L27)③
材 質	豚毛+ナイロンライト	マイクロファイバー	綿糸パフ
寸法 (内/外)	Ø40/Ø80mm	Ø40/Ø100mm	Ø40/Ø80mm
使用回転数	1,400rpm	1,400rpm	1,400rpm
品名 (コンパウンド)	ハトーポリスター ポリッシングペースト	ハトー ポリスター	
	リンティグレイ④	ベージュ⑤	エマルジョン⑥
質 量	90g	85g	50ml

【使用目的又は効果】

使用目的

歯科用レジン・ハイブリッドレジンの義歯の研磨に使用する。

【使用方法等】

使用方法

- カーバイドバー等で、アクリル義歯のバリ取りを行う。
- 中研磨**：4280 (L33)を歯科用レースに装着し、ハトーポリスター ポリッシングペースト リンティグレイを回転させたブラシに押し当て塗布し、中研磨を行う。
- 光沢研磨**：520-100/7 (L23)に取り替え、ハトーポリスター ポリッシングペースト ベージュを回転させたブラシに押し当て塗布し、仕上げの研磨を行う。
- 最終光沢研磨**：研磨対象面にハトー ポリスター エマルジョンを適量塗布し、152-80BW (L27)をレースに装着し回転させながら、コンパンドを拭き取るように研磨を行う。
- 2)～4)の作業は、軽いタッチで断続的に押しつけながら作業を行うこと。過度の加圧は、摩擦熱により研磨物の変形やブラシの焼き付けの原因になる。

【使用上の注意】

- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 目の損傷を防ぐ為に、保護メガネ等を使用して作業を行うこと。
- 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 排気装置を備えた環境で作業を行うこと。
- 使用回転数（1,400r.p.m）を超えた使用は、摩擦熱でレジンに焦げや変形が生じるので、過度の回転数で使用しないこと。
- レジンの発熱や破損を避ける為に、軽い圧力で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 本材は、火気を避け外圧（物理的負荷）や、落下のおそれがない場所に、安定状態で保管すること。
- 化学薬品の保管場所や、塩分、イオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ブラシやコンパウンドは、必ず別々に収納して保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社

製造業者：HATHO GmbH

国 名：ドイツ連邦共和国